



Zuweisungsinformation – Antiepileptika Medikamentenspiegelbestimmung

Präanalytik

Untersuchungsmaterial: Serum, EDTA-Plasma; Verwenden Sie KEINE Röhrchen mit Gel-Separatoren sowie Antikoagulantien wie Citrat, Heparin oder Oxalat. Hämolyse ist zu vermeiden. Mindestvolumen: 2,5ml

Transportbedingungen: Raumtemperatur, unmittelbare Zusendung der Probe ins Labor

Diagnostische Wertigkeit

Die Untersuchung dient der Überprüfung der Compliance und ist bei Verdacht auf Intoxikation indiziert. Eine Änderung der Medikamentendosis soll nur im Kontext des klinischen Ansprechens oder Therapieversagens vorgenommen werden.

Weitere Information

https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/neuro-psychiatrische_krankheiten/article/495146/serumwerte-epilepsie-therapie-oft-ueberschaetzt.html